

Gebrauchshinweise

AllProMask Classic – OP-Masken Typ IIR



1. Händehygiene

Vor dem Anlegen der Maske die Hände gründlich waschen und desinfizieren.



2. Anlegen

Schlaufen über die Ohren ziehen. Blaue Seite außen tragen, Nasenbügel oben.




3. Anpassen

Maske entfalten, sodass sie Mund, Nase und Kinn dicht umschließt. Nasenbügel festdrücken.



4. Anwendung

Maske max. 8 Std. tragen. Maskenkörper nicht mehr mit den Händen berühren.

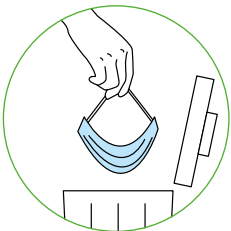

5. Entsorgen

Nach einmaligem Gebrauch und bei Durchfeuchtung fachgerecht entsorgen. Nur an den Schlaufen berühren.



6. Händehygiene

Nach dem Abnehmen und Entsorgen der Maske die Hände gründlich waschen und desinfizieren.



☎ 0 41 54 _ 799 599

@ allpromask@pav.de

🏭 Paul Albrechts Verlag GmbH
Hamburger Straße 6
22952 Lütjensee
Germany

Stand 04/2021