


Gebrauchshinweise

AllProMask Comfort – OP-Masken Typ IIR



1. Händehygiene

Vor dem Anlegen der Maske die Hände gründlich waschen und desinfizieren.

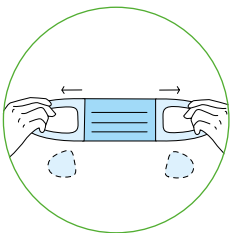

2. Vorbereitung

Ohrschlaufen trennen und übriges Vlies entfernen. Maske ausreichend dehnen, blaue Seite außen tragen, Nasenbügel oben.




3. Anlegen

Schlaufen über die Ohren ziehen. Maske entfalten, sodass sie Mund, Nase und Kinn dicht umschließt.



4. Anwendung

Nasenbügel festdrücken. Maske max. 8 Std. tragen. Maskenkörper nicht mehr mit den Händen berühren.

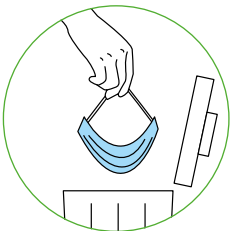

5. Entsorgen

Nach einmaligem Gebrauch und bei Durchfeuchtung fachgerecht entsorgen. Nur an den Schlaufen berühren.



6. Händehygiene

Nach dem Abnehmen und Entsorgen der Maske die Hände gründlich waschen und desinfizieren.



☎ 0 41 54 _ 799 599

@ allpromask@pav.de

🏭 Paul Albrechts Verlag GmbH
Hamburger Straße 6
22952 Lütjensee
Germany

Stand 04/2021